

# **SPANNRIT NEO**

## **MEMOPUR® Duo Lazr auf Leisten tiefziehen**




**1**

Einlage bei 110 °C Umluft für ca. 6 – 7 Minuten im Ofen erwärmen, bis diese flexibel wird.




**2**

Einlage mit optionaler Oberdecke auf Leisten oder Gips legen.

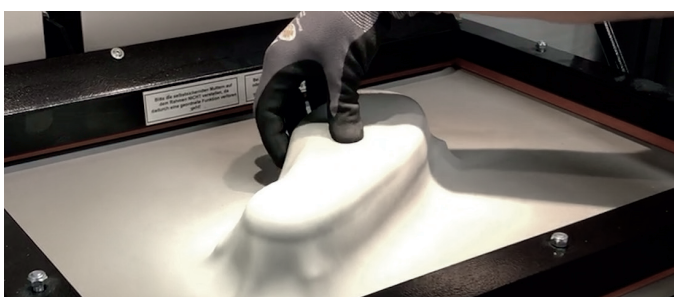

**3**

Tiefziehen und darauf achten, dass die Einlage nicht verrutscht.

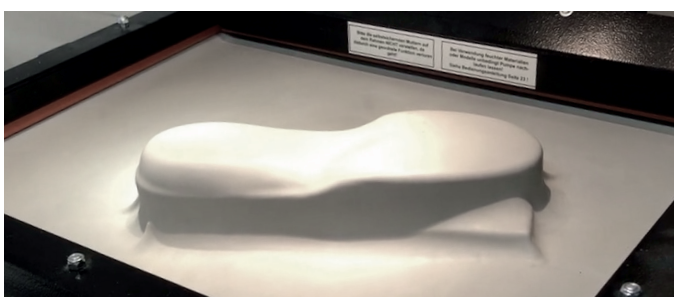

**4**


Einlage ca. 10 Minuten auskühlen lassen.

## **SPANNRIT NEO** **MEMOPUR® Duo Lazr auf Leisten tiefziehen**



**5**

Einlage hat die Form des  
Leisten angenommen.

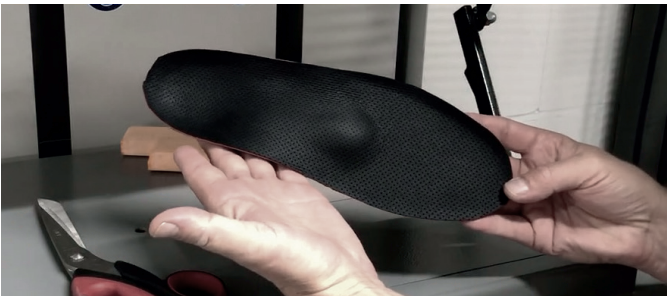

**6**

Oberdecke beschneiden.  
Fertig!